

Kategori **Tygge / Kæbe**

## **Chewy MINI dupper**

Model/Varenr.: 41

**Pris fra 98,75 DKK (inkl. moms)**

### Om Chewy Tubes

Chewy Tubes styrker kraften i kæberne, og udvikler gode forudsætninger for at bide og tygge. Tyggemusklerne stimuleres og sensoriske problemer som f.eks. taktil skyhed og forstyrret proprioception reduceres ved målrettet brug. Chewy Tubes er velegnet til børn og voksne, som bider i alt muligt. Trangen til at sutte, bide eller tygge kan være svær at hæmme, derfor er Chewy Tubes et hensigtsmæssigt og sikkert alternativ til fingre, tøj eller genstande. Chewy Tubes® er fremstillet af termo-elastisk polymer materiale i USA under strenge krav til sikkerhed og sundhed. De Chewy Tubes, som Birdhouse forhandler er fremstillet af FDA godkendte materialer og fri for BPA, PVC, bly, latex og phthalater. Chewy Tubes® er godkendt efter disse standarder:

- ISO 14971
- EU-Direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EEC
- U.S. Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 820


### Sikkerhed ved anvendelse af Chewy Tubes, TriChew, Tyggegreb og andre tyggeredskaber

- Vi anbefaler, at Chewy Tubes, TriChew, Tyggegreb og andre tyggeredskaber anvendes under observation af voksne.
- Chewy Tubes, TriChew, Tyggegreb mv. skal jævnligt efterses for slitage.
- Børn eller voksne brugere skal ikke selv holde Chewy Tubes, TriChew, Tyggegreb mv. under træning eller adspredelse, men under observation af voksne.
- Der skal ikke anvendes samme type Chewy Tubes, TriChew, Tyggegreb mv. til både træning og leg eller adspredelse.
- Chewy Tubes, TriChew, Tyggegreb mv. skal anvendes på kindtænderne. Hvis barnet eller brugeren bider i dem mellem fortænder eller hjørnetænder kan der være risiko for, at de brækker eller skæres over.
- Man må ikke trække i Chewy Tubes, TriChew, Tyggegreb mv. samtidig med, at man bider i dem.
- Det vandrette håndtag (som den øverste streg på et T) er til at holde i.

Når Chewy Tubes, TriChew, Tyggegreb og andre tyggeredskaber anvendes efter disse forholdsregler, er der lang holdbarhed.

### Rengøring

Chewy Tubes rengøres i vand med mild sæbe, eller i opvaskemaskine eller overhældes med kogende vand.

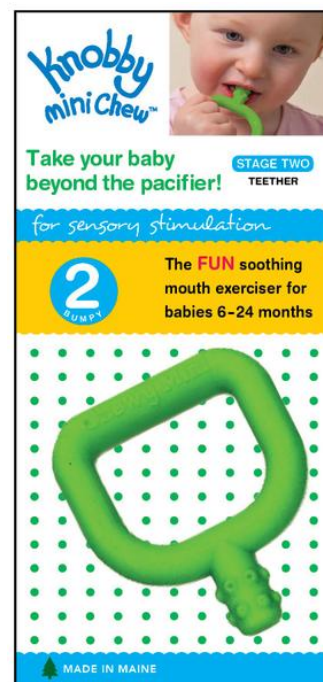

Grøn (Model/Varenr.: 41-1)

98,75 DKK

Rød (Model/Varenr.: 41-2)

98,75 DKK